

Communicator 5

Fiches de familiarisation



Voici vos fiches de familiarisation Communicator 5. Elles vous aideront à débiter avec votre nouveau dispositif. Ces fiches contiennent des idées pour un usage quotidien, ainsi que des instructions d'édition de base étape par étape.

Communicator 5 propose un large choix de pages de communication et de claviers visuels, ainsi que des outils faciles à utiliser pour la messagerie électronique, la messagerie texte, la téléphonie, les télécommandes infrarouges, et bien plus encore.

Table des matières


1	Codes QR et entretien du dispositif
2	Glossaire de Communicator 5
3	Éditer votre page d'accueil et Message Banking
4	FAQ et explorons !
5	Options Computer Access et Control
6	Windows Access et informations importantes
7	Énoncer et modifier la disposition du clavier
8	Mes expressions et messagerie électronique
9	Télécommande IR et calendrier
10	Messagerie texte et Mes fichiers texte
11	Appareil photo, Mes photos et fonctionnalités supplémentaires
12	Sauvegarder/exporter des profils et guide de mise en route
13	myTobiiDynamovox.com et assistance supplémentaire



Codes QR

Les codes QR sont utilisés dans ce document afin de vous permettre d'accéder rapidement à des sources d'information telles que des vidéos, sans avoir à taper des adresses Web.

Vous pouvez utiliser votre téléphone portable ou tablette pour scanner le code QR. La source d'information s'affichera alors automatiquement.

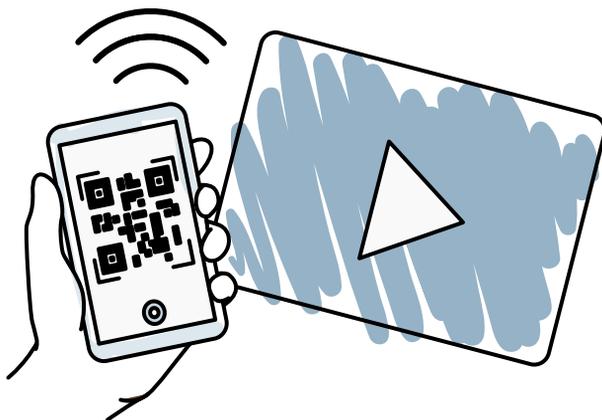

Si vous ne disposez pas de lecteur de code QR sur votre appareil, suivez ces instructions :

Utilisateurs Android

Vous pouvez obtenir gratuitement un lecteur de code QR dans Google play store. Tapez Scanner QR ou Lecteur QR dans la barre de recherche afin d'en trouver un.

Utilisateurs Windows

Téléchargez gratuitement un lecteur de code QR dans la boutique Windows. Tapez « Scanner QR » ou « Lecteur QR » dans la barre de recherche afin d'afficher les choix.

Utilisateurs iOS

La fonction de lecture des codes QR est intégrée dans iOS 11. Il vous suffit tout simplement d'ouvrir l'application de votre appareil photo, d'orienter celui-ci vers le code QR et une notification apparaîtra.

Si vous n'avez pas effectué ou n'êtes pas en mesure d'effectuer de mise à jour vers iOS 11, il vous faudra télécharger un lecteur de code QR. De nombreux lecteurs de code QR gratuits et payants sont disponibles dans l'App Store.



Entretien du dispositif

La conception de nos dispositifs diffère de celle des ordinateurs portables ou tablettes classiques.

Ils sont conçus pour durer, avec un disque robuste et rapide capable de résister aux chocs et un indice de protection IP54 certifiant sa résistance à l'humidité et à la poussière. Par ailleurs, l'écran est constitué en verre Gorilla Glass™, qui résiste aux chocs.

N'hésitez pas à emporter votre dispositif partout où vous allez en toute confiance.

Est-il possible d'utiliser votre dispositif sous une pluie légère ?

Aucun problème ! Votre dispositif est conçu pour résister aux éclaboussures d'eau. Assurez-vous que les protections des ports soient en place lorsque vous êtes en ballade et vous aurez ainsi le temps de vous mettre à l'abri.

Est-il possible d'utiliser votre dispositif pendant les repas ?

Aucun problème. Il vous suffit d'essuyer l'écran avec un chiffon humidifié en cas de besoin.



Entretien votre dispositif est important et facile.

Entretien du câble :

- Lorsque le dispositif est en cours de chargement, assurez-vous qu'il soit placé à proximité d'une prise de courant afin d'éviter de tirer accidentellement sur le câble et les connecteurs.
- Le câble d'alimentation ne doit pas être étroitement enroulé ou torsadé autour de quelque chose.

Nettoyage :

- Avant de nettoyer votre dispositif, éteignez-le et débranchez tous les câbles.
- Vous pouvez utiliser des lingettes désinfectantes.
- N'essuyez que les surfaces externes et laissez le produit sécher naturellement.



N'utilisez pas de produits en vaporisateur qui pourraient saturer le dispositif.



Glossaire de Communicator 5

Bouton

Un élément de la page contenant un son, une lettre, un mot ou une phrase, que l'utilisateur peut sélectionner. Un bouton peut également être utilisé pour modifier un paramètre.

Page


Un écran sur lequel un ensemble de boutons peut être affiché à un moment donné. Les boutons affichés sur la page peuvent contenir des liens vers d'autres pages affichant un nouveau contenu.

Ensemble de pages

Un lot de pages souvent basé sur un thème. Par exemple un ensemble de pages peut concerner la messagerie électronique, les messages textes ou des expressions courantes. Il peut également s'agir d'une ou plusieurs page(s) personnalisée(s), dont le contenu peut par exemple concerner une émission favorite. Un ensemble de pages peut être composé d'une seule page ou de plusieurs pages.

Utilisateur

Un profil d'utilisateur contient tous les ensembles de pages, les paramètres, les expressions et les contacts de la personne.

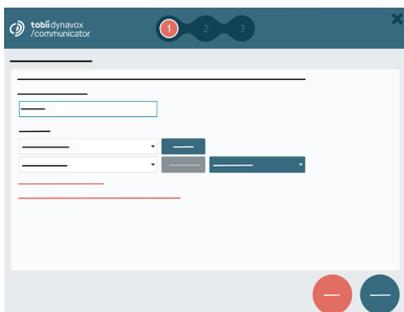

Page d'accueil

Il s'agit de la page de démarrage (ou page principale) qui contient les liens vers d'autres ensembles de pages, tels que le clavier, la messagerie électronique et autres.



Moyen de saisie

La façon dont une personne active les boutons sur l'écran. Il existe quatre possibilités dans Communicator 5.

- 1 Gaze Interaction**
Utiliser le regard pour accéder à l'appareil.
- 2 Moyen tactile / Souris**
Appuyer sur l'écran tactile ou effectuer un clic gauche sur la souris.
- 3 Fixation par la souris**
Stabiliser le curseur de la souris sur une zone pendant une durée prédéfinie. Cela élimine la nécessité de cliquer avec la souris.
- 4 Défilement**
Sélectionner un bouton lorsqu'il est mis en surbrillance à l'aide d'un contacteur.


Glossaire de Communicator 5

Menu rapide

Permet d'accéder facilement aux fonctions et commandes que vous utilisez le plus fréquemment lorsque vous parcourez et personnalisez votre page d'accueil. Ce menu est accessible par le moyen d'accès tactile ou avec la souris uniquement.

Activez-le de l'une des façons suivantes :

- Clic droit.
- Appuyer et maintenir enfoncé sur l'écran.

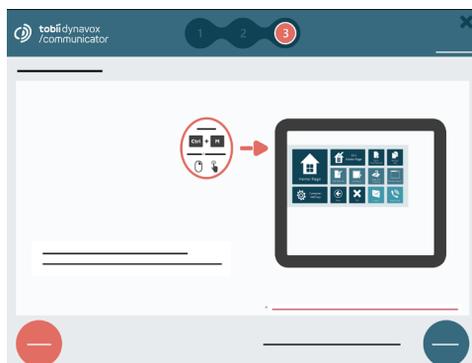

Prédiction de mots

La prédiction de mots est un moteur de prédiction automatique qui s'appuie sur la grammaire et l'orthographe afin d'accélérer la frappe. Les boutons de prédiction de mots changent au fur et à mesure que vous tapez.

Paramètres



Paramètres

- L'utilisateur peut accéder au menu Paramètres avec n'importe quel moyen de saisie.
- Le menu Paramètre permet de modifier le volume, la luminosité, les paramètres de saisie, le clavier et autres.
- Vous pouvez accéder au menu Paramètres sur la page d'accueil.

Paramètres avancés

- Les paramètres avancés ne sont accessibles qu'avec le moyen tactile ou une souris.
- Vous trouverez les paramètres avancés dans le menu rapide.
- Six onglets sont présents ici :
 - ▶ Saisie
 - ▶ Clavier et langue
 - ▶ Son
 - ▶ Applications
 - ▶ Configuration utilisateur
 - ▶ Système



Éditer votre page d'accueil

Les éléments disponibles sur la page d'accueil ne sont que des suggestions. Vous pouvez supprimer ou ajouter n'importe quel élément en fonction de vos besoins.

Supprimer un ensemble de pages :

- 1 Sélectionnez **Éditer la page d'accueil**.



- 2 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez supprimer.
- 3 Sélectionnez **Supprimer**.
- 4 Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, sélectionnez **Supprimer pour confirmer**.



Conseil utile

Activez la barre d'état sur votre page d'accueil afin d'être en mesure de surveiller rapidement le statut du suivi de votre regard, l'usage de la batterie de votre dispositif et le statut de votre connexion Wi-Fi.

Ces étapes ne sont accessibles qu'avec le moyen tactile ou une souris.

- 1 Ouvrez le menu rapide
- 2 Sélectionnez **Paramètres avancés**
- 3 Sélectionnez **Système**.
- 4 Sélectionnez **Activer la barre d'état**.



Message Banking

Message banking vous permet de préserver votre propre voix naturelle grâce à des messages enregistrés. Ces messages peuvent être utilisés ultérieurement dans un logiciel de communication tel que Communicator 5.

Scannez ce code pour obtenir plus d'informations sur Message Banking.



Conseils utile

Il est important de démarrer le processus dès que possible afin que la qualité et la clarté de votre voix puissent être enregistrées.

Informations de base sur Message Banking

Message Bank de Tobii Dynavox vous permet de collecter, d'organiser et de stocker gratuitement des messages enregistrés jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Les messages peuvent être téléchargés et utilisés sur n'importe quel système en mesure de les lire.

Étape 1 : Choisissez le message à enregistrer et à stocker.

Prenez le temps de penser à des expressions ou messages importants ainsi qu'à des récits qui sont importants pour vous.

Étape 2 : Enregistrez vos messages.

Vous pouvez enregistrer des messages de deux façons différentes.

- 1 Enregistrez le message directement dans Communicator 5.
- 2 Enregistrez des messages à l'aide d'un enregistreur numérique de haute qualité, puis téléchargez-les vers Message Bank de Tobii Dynavox. Nous recommandons l'enregistreur portable numérique Zoom H1.

Étape 3 : Téléchargez les messages stockés vers Communicator 5.

- 1 Importez vos fichiers audio .wav à partir du fichier zip de Message Bank.
- 2 Les enregistrements sont automatiquement importés dans la zone « Mes expressions » et ajoutés aux pages Expressions.
- 3 Les messages sont classés en fonction des intitulés que vous leur avez attribués dans Message Bank et utilisées pour la prédiction.



Questions fréquentes

Qui peut bénéficier de Message Banking ?

Message Banking s'adresse potentiellement aux personnes souffrant d'une pathologie dégénérative telle que la sclérose latérale amyotrophique (SLA), la maladie du motoneurone ou la maladie de Parkinson, aux personnes nécessitant une glossectomie ou laryngectomie totale, ou aux personnes concernées par des procédures médicales planifiées nécessitant une intubation ou une ventilation assistée.

Dois-je calibrer mon dispositif à chaque fois que je l'utilise ?

Non. Votre profil de calibrage sera sauvegardé. Néanmoins, si vous constatez que celui-ci manque de précision, vérifiez votre statut de suivi. Si vous êtes assis dans un endroit très clair, comme par exemple à proximité d'une fenêtre, pensez à fermer les rideaux. Sinon, vous pouvez toujours effectuer un nouveau calibrage si vous le souhaitez.

Que faire si je rencontre des difficultés lors du calibrage de mon dispositif ?

Scannez le code QR ci-dessus afin de découvrir les solutions de dépannage du calibrage.

Puis-je utiliser mon dispositif pour les communications longue distance, comme par exemple des appels téléphoniques ou des messages texte ?

Oui ! Vous pouvez utiliser Communicator 5 pour envoyer des messages électroniques et des messages texte.

Existe-t-il une solution pour les personnes souffrant d'un handicap physique et n'étant pas en mesure de toucher un tableau de communication ?

Oui ! Il existe différents moyens de permettre à une personne d'effectuer des sélections sur un appareil de CAA. On parle souvent de « moyen d'accès ». Les personnes qui ne sont pas en mesure de toucher l'écran peuvent utiliser le regard, un dispositif de pointage à la tête ou le défilement en tant que moyen de sélection principal. Scannez ce code pour visionner une vidéo concernant les moyens de saisie (d'accès) sur les dispositifs de CAA de pointe.

Scannez ce code pour visionner une vidéo concernant les moyens d'accès sur les dispositifs de CAA de pointe.



Explorons !

Profitez de ces activités pour vous familiariser avec votre dispositif.

Erreurs courantes à éviter :

- Pas besoin de partir de zéro. La structure a déjà été pré-programmée par nos soins. Il vous suffit donc de vous familiariser avec le logiciel Communicator 5 et de le personnaliser en fonction de vos besoins.
- Évitez de mettre la pression sur l'utilisateur ou vous-même. La réalisation de toutes les tâches avec précision dès le début n'est pas un objectif réaliste. Ce n'est pas grave de faire des erreurs.
- Soyez persévérant, L'Eye Tracking (commande oculaire) est une compétence qui s'apprend et nécessite de la pratique. N'oubliez pas de faire des pauses lorsque cela est nécessaire.

Gains de temps :

- Les majuscules n'ont pas d'importance si vous utilisez le dispositif pour parler.
- Profitez de l'extension des abréviations et de la prédiction des mots.
- La préparation est essentielle. Beaucoup d'interactions que vous rencontrerez sont prévisibles. Par conséquent, ajoutez des expressions importantes pour être en mesure d'y accéder rapidement sans avoir à effectuer de saisie chaque fois.
- Assurez-vous que vous disposez d'un moyen de communication alternatif.



Options de Computer Access

Windows Access pour Communicator 5

Comment fonctionne ce logiciel ?



Ce logiciel utilise un menu latéral afin de vous permettre d'interagir avec les éléments présents sur votre ordinateur, notamment les applications de bureau et Internet.

Comment puis-je accéder à ce logiciel ?

Utilisez vos yeux ou un contacteur pour accéder à votre bureau.

À quoi ressemble le clavier ?



Plusieurs dispositions de clavier correspondant à celles de Communicator 5 sont disponibles afin de permettre une familiarisation rapide.

Comment puis-je accélérer ma saisie ?


Les deux applications logicielles comportent la fonction de prédiction des mots afin d'accélérer votre saisie. La fonction de prédiction des mots retient les mots que vous utilisez fréquemment. Les expressions que vous utilisez et enregistrez dans Communicator 5 sont également disponibles.

Quelles sont les langues disponibles ?

Les deux applications logicielles sont disponibles dans plusieurs langues. Consultez tobiidynavox.com pour obtenir les informations les plus récentes.

Computer Control

Comment fonctionne ce logiciel ?

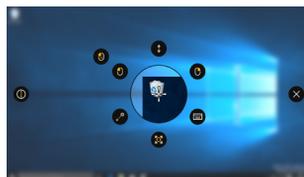

Ce logiciel utilise un menu d'interaction (le menu encercle l'élément que vous souhaitez sélectionner) afin de vous permettre d'interagir avec les éléments présents sur votre ordinateur, notamment les applications de bureau et Internet.

Comment puis-je accéder à ce logiciel ?

Utilisez vos yeux pour contrôler votre ordinateur à l'aide du logiciel Computer Control.

À quoi ressemble le clavier ?




Le clavier a été spécifiquement conçu pour permettre d'accéder rapidement et efficacement aux éléments dont vous avez besoin.



Computer Control

Computer Control bénéficie d'un nouveau moyen de sélection intuitif appelé « Interaction First ». Sélectionnez l'élément avec lequel vous souhaitez interagir, comme par exemple un fichier ou un raccourci sur le bureau, puis choisissez ce que vous souhaitez faire avec.

Comment ça marche ?

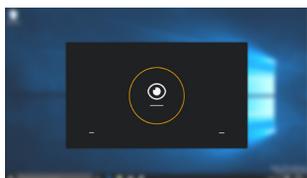


Au fur et à mesure que votre regard parcourt l'écran, vous verrez un léger « tracé » qui suit votre regards.

Pour interagir avec un élément tel qu'une icône ou un bouton affiché sur l'écran, regardez-le. L'aspect du tracé change et laisse apparaître le bouton d'activation.



Regardez le bouton d'activation afin que le menu d'interaction complet apparaisse. À partir du haut et dans le sens des aiguilles d'une montre, vous trouverez des icônes qui vous permettront de faire défiler l'écran, d'effectuer un clic droit, d'utiliser le clavier, de régler la précision, de glisser/déposer et d'effectuer un clic et un double clic gauche.

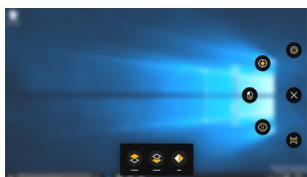

Sélectionnez la fonction dont vous avez besoin. Par exemple, pour ouvrir Google Chrome à partir du bureau, regardez l'icône de double clic afin de lancer l'application. Si vous souhaitez viser une cible de petite taille, assurez-vous que celle-ci se trouve au centre du cercle. Vous pouvez utiliser la fonction de réglage pour y parvenir.

Le bouton Autres vous permet d'effectuer ce qui suit : Accéder aux paramètres, calibrer, mettre la fonction Eye Gaze (regard) en pause, utiliser le clic continu, basculer d'une application à l'autre et accéder aux raccourcis.



Windows Access



Windows Access vous permet de contrôler votre ordinateur à l'aide des fonctions intégrées de Communicator 5.

La barre de menu de Windows Access peut être positionnée sur le côté ou en bas de votre écran.



Les paramètres de Windows Access sont situés sur la page 2 de vos options de configuration.



Cliquer dans Windows Access :


Vous pouvez effectuer des clics gauche, des clics droit et des double clics. Il existe deux moyens de sélection :

Placer le curseur au-dessus d'un élément pour cliquer :

Placez le curseur au-dessus de la cible choisie pour qu'un clic se produise.

Effectuer un zoom pour cliquer :

Placez le curseur au-dessus de la cible choisie pour que le zoom démarre. Le clic sera effectué une fois la durée du zoom écoulée.

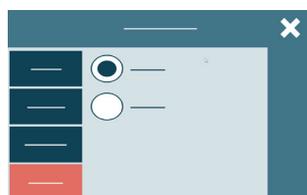

Accéder aux programmes :

L'icône d'exécution des programmes située sur la page 2 du menu Windows Access vous permettra de lancer les logiciels que vous utilisez fréquemment.

Vous pouvez modifier votre sélection de programmes ou y ajouter d'autres programmes dans vos paramètres Windows Access.



Énoncer



Familiarisez-vous avec la disposition du clavier dans la fonction d'énonciation. Le but est de vous aider à communiquer le plus rapidement et efficacement possible.

Étapes de la pratique :

1 Commencez par taper des mots (membres de la famille, endroits favoris etc.) sur le clavier. Si vous souhaitez pratiquer plus avant, tapez les réponses à ces questions.

- Quelle est votre couleur favorite ?
- Quels livres aimez-vous lire ?
- Quel genre de films aimez-vous ?

2 Pratique de la prédiction des mots et expressions :

Commencez par taper vos réponses aux questions ci-dessous. Après avoir tapé 1 ou 2 lettres, regardez les boutons de prédiction de mots pour voir si le mot est là.

- Quel pays aimeriez-vous visiter ?
- Si vous pouviez être un animal, lequel choisiriez-vous et pourquoi ?

3 Utilisation de votre dispositif dans la vie réelle. Exercez-vous en utilisant le clavier et les boutons de prédiction dans les situations suivantes :

- Partager des informations sur ce que vous avez fait la nuit dernière ou pendant le week-end.
- Parler d'une actualité récente.




Le saviez-vous ?

Plus vous tapez un mot, plus il est probable que celui-ci apparaisse dans la prédiction de mots.

Le saviez-vous ?

Vous pouvez disposer de différentes dispositions de clavier. Consultez la fiche Modifier les dispositions du clavier.

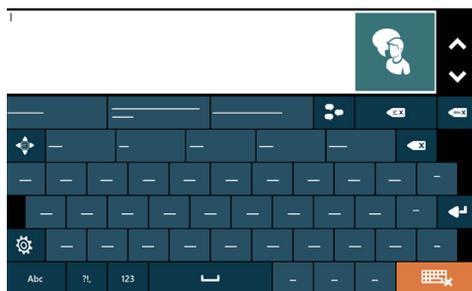

Modifier les dispositions du clavier

Dans Communicator 5, vous pouvez choisir parmi plusieurs dispositions de clavier.

Menu Paramètres



- 1 Sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres du clavier**. Plusieurs captures d'écran représentant des dispositions de clavier apparaissent. Il existe trois dispositions principales :

	Standard (par défaut)	Grille	Gros boutons
Organisation (décrite ci-dessous)	QWERTY/AZERTY, ABC, SCAN, Pointeur	ABC, SCAN, Pointeur	ABC, SCAN, Pointeur
Prédiction	Prédiction des mots et expressions	Aucun	Prédiction des mots
Taille du bouton	Petit	Moyen	Grand
Guide doigts	Non	Oui	Oui
Extras	Grande fenêtre de message permettant la création de messages et de texte contenant plusieurs lignes.	Convient pour l'eye tracking (commande oculaire). Grande zone cible.	Sélection de lettres à frappes multiples pour les utilisateurs qui nécessitent des boutons plus gros.

- 3 Sélectionnez le clavier et regardez-le pour voir à quoi il ressemble.
- 4 Si vous souhaitez modifier l'organisation du type de clavier que vous avez choisi, sélectionnez QWERTY/AZERTY/ABC.
- 5 Quatre choix sont disponibles :
 - QWERTY/AZERTY est une disposition habituelle présente sur les claviers.
 - ABC est une disposition par ordre alphabétique.
 - « Défilement » est une disposition optimisée pour les personnes utilisant un contacteur en tant que moyen de saisie.
 - « Pointeur » est une disposition optimisée pour les personnes utilisant un dispositif de pointage en tant que moyen de saisie.



Mes expressions



Le contenu de la page Mes expressions est constitué de votre historique de messages et d'espace destiné à ajouter vos propres expressions. Le stockage préalable d'expressions concernant des thèmes importants peut vous permettre de communiquer rapidement sans avoir à saisir des messages en entier.

- 1 Pensez à des catégories (situations) et expressions auxquelles vous souhaitez accéder rapidement. Il s'agit par exemple de situations comme les rendez-vous, les sorties au restaurant ou les rencontres entre amis etc.

Ajouter une nouvelle catégorie :

- Sélectionnez **Ajouter une nouvelle catégorie**.
- Saisissez le nom de la catégorie.
- Sélectionnez Terminé



Ajouter une nouvelle expression :

- Choisissez la **catégorie** de la nouvelle expression.
- Sélectionnez **Ajouter une nouvelle expression**.
- Saisissez l'expression.
- Sélectionnez Terminé.



- 2 Après avoir ajouté vos expressions, sélectionnez chacune d'entre elles afin de vous familiariser avec son contenu et son emplacement. Ajustez les expressions ou les emplacements en fonction de vos besoins.
- 3 Pratiquez l'utilisation des expressions que vous avez ajoutées et continuez à en ajouter en fonction de vos besoins.



Conseil utile

Si vous ne voyez pas plusieurs catégories d'expressions, il vous faudra peut-être en importer. Pour importer des expressions, sélectionnez **Paramètres avancés** → **Claviers et langues** → **Expressions** → **Importer** et suivez les invites qui apparaissent à l'écran.



Messagerie électronique



La messagerie électronique vous permet d'envoyer, de recevoir et de gérer facilement et efficacement les messages électroniques. Pour configurer votre messagerie électronique, vous avez besoin d'une personne qui est en mesure de toucher l'écran.

Étapes

- 1 Ouvrez le **Menu rapide**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres avancés**.
- 3 Sélectionnez **Applications**.
- 4 Sélectionnez **Messagerie électronique**.
- 5 Sélectionnez **Nouveau**.
- 6 Sélectionnez votre fournisseur de messagerie électronique (Gmail, Yahoo, Hotmail, Outlook, Live ou GMX). Si votre messagerie ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Configurer manuellement** et contactez votre fournisseur de messagerie électronique afin d'obtenir les informations adéquates sur le serveur.
- 7 Sélectionnez **Suivant**.
- 8 Sélectionnez **Terminé** et **OK** pour fermer le menu.

Maintenant que tout est configuré, essayons !

- 1 Envoyer un message électronique.
- 2 Lire un message électronique.
- 3 Répondre à un message électronique.



Télécommande IR




Les fonctions de la télécommande infrarouge vous permettent de faire fonctionner des appareils de divertissement comme des télévisions, des lecteurs DVD ou la radio. Vous pouvez également contrôler des dispositifs présents dans votre environnement, comme par exemple l'éclairage, les portes et les lits à des fins de réglage avec des équipements supplémentaires.

Pour paramétrer des fonctions infrarouges, vous devez enseigner des commandes spécifiques au dispositif. Par exemple, vous avez besoin des boutons Marche/Arrêt, Vol. + et Vol. -, P+ et P- etc. pour la télévision.

Votre page d'accueil contient des pages de télécommandes complètes pour les télévisions, les lecteurs DVD, les chaînes stéréo et la radio. Il existe des pages simplifiées que vous pouvez ajouter à la page d'accueil si vous ne souhaitez pas disposer de toutes les fonctions.

- 1 Prenez la télécommande de l'appareil que vous souhaitez programmer.
- 2 Prenez votre dispositif de communication.
- 3 Allez à votre page Télécommande et sélectionnez le bouton dont vous souhaitez programmer la fonction.
- 4 Une fenêtre contextuelle apparaît et vous indique qu'aucune commande n'a été programmée.
- 5 Sélectionnez **Oui** pour programmer une nouvelle commande.
- 6 Pointez la télécommande vers le récepteur infrarouge situé à l'arrière du dispositif de communication.
- 7 Suivez les invites qui s'affichent à l'écran.
- 8 Une fois ceci effectué, vous serez redirigé vers l'ensemble de pages.
- 9 Le bouton change de couleur s'il a été correctement programmé.
- 10 Essayez le bouton avant de passer au suivant.

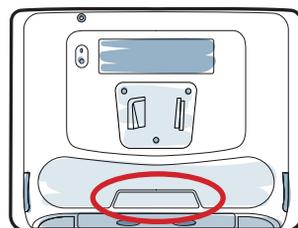

Conseil utile

Vous pouvez également utiliser votre dispositif avec des assistants intelligents tels qu'Alexa et Google Home.



Calendrier




Le calendrier vous permettra de définir des rendez-vous et des rappels.

Étapes

- 1 Sélectionnez **Calendrier** sur votre page d'accueil.
- 2 La date du jour est mise en surbrillance en jaune.

Pour ajouter un rendez-vous :

- Allez à la date de votre rendez-vous.
- Sélectionnez **Nouveau**.
- Saisissez le nom de votre rendez-vous.
- Sélectionnez l'heure de début et de fin.
- Vous pouvez choisir d'activer un rappel.

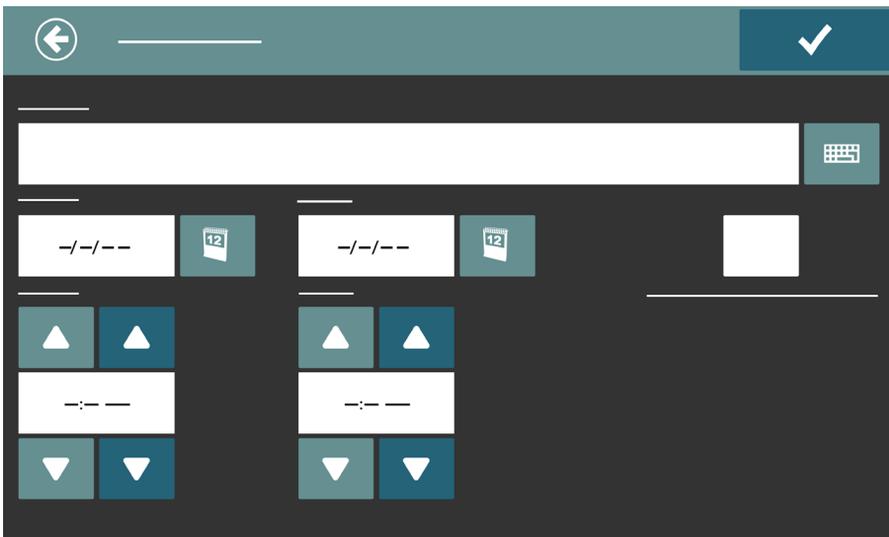

Messages texte



Vous pouvez envoyer et recevoir des messages texte en connectant un téléphone portable à votre dispositif via Bluetooth. Pour configurer votre téléphone, vous avez besoin d'une personne qui est en mesure de toucher l'écran.

- 1 Accédez au **menu rapide**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres avancés**.
- 3 Sélectionner **Applications**.
- 4 Sélectionnez **Téléphone mobile**.
- 5 Installez l'application Beam de Tobii Dynavox (BETA) sur votre téléphone.
- 6 Lancez l'application et sélectionnez **Connecter un téléphone**.
- 7 Activez Bluetooth et coupez votre téléphone.

Maintenant que votre téléphone est prêt et fonctionne, essayez-le !

Envoyez un court message à quelqu'un. Demandez-lui de vous répondre afin de vous assurer que cela fonctionne.



Mes fichiers de texte



Mes fichiers de texte vous permet d'enregistrer de longs fichiers. Il s'agit par exemple de récits personnels, de discours ou de présentations. L'enregistrement et l'organisation de vos fichiers à cet emplacement vous permet d'y accéder facilement et de décider du début et de la fin de l'énonciation.

Crée un nouveau fichier de texte :

- 1 Sélectionnez **Nouveau**.
- 2 Commencez par taper le contenu de votre fichier. Vous nommerez ce fichier ultérieurement.
- 3 Une fois ceci terminé, sélectionnez Terminé.
- 4 Une fenêtre contextuelle montrant le nom et le contenu du fichier s'affiche alors. Par défaut, la première partie du contenu que vous avez saisi apparaît dans le nom du fichier.
 - Pour modifier ceci, sélectionnez l'icône du clavier située à côté du nom du fichier.
 - Sélectionnez le bouton **Effacer**.
 - Tapez le nouveau nom du fichier.
 - Sélectionnez **Enregistrer**.



Vous avez toujours la possibilité de revenir à votre fichier et de le modifier.

- 1 Sélectionnez le nom du fichier dans la colonne de gauche.
- 2 Sélectionnez le bouton **Modifier**.
- 3 Modifiez votre document ou ajoutez-y du contenu.

Pour énoncer votre fichier :

- 1 Sélectionnez le nom du fichier dans la colonne de gauche.
- 2 Sélectionnez **Énoncer le texte**
- 3 Pour arrêter l'énonciation, sélectionnez **Arrêter l'énonciation**



Appareil photo et Mes images



Prenez, enregistrez et organisez vos images en utilisant l'appareil photo et Mes images.



Les photos prises avec l'appareil photo sont automatiquement enregistrées dans le dossier Images du dispositif et apparaissent automatiquement dans Mes images.

Mes images accède au dossier des images sur votre dispositif. Vous pouvez les filtrer par :

- Toutes les images
- Ajoutée récemment
- Date
- Appareil photo
- Dossier

Si vous sélectionnez Affichage, vous pouvez effectuer ce qui suit:

- Faire pivoter l'image vers la gauche ou la droite
- Ajouter une description
- Imprimer
- Supprimer

Le diaporama commence et présente les images dans l'ordre en les faisant défiler automatiquement.

Vous pouvez sélectionner une cadence d'affichage lente, moyenne ou rapide. Vous pouvez également faire défiler les images manuellement.



Fonctions supplémentaires



Alarme

Attirez rapidement l'attention des autres à l'aide du bouton Alarme situé sur votre page d'accueil.



Lecteur audio

Le lecteur audio vous permet d'écouter de la musique sur votre dispositif. Comme il s'agit d'un lecteur audio très simple, nous vous recommandons de ne pas télécharger plus de trois ou quatre albums. Pour télécharger de la musique, vous devez être en mesure d'accéder au menu rapide par le biais de l'écran tactile ou de la souris.

Vous devrez ajouter un lecteur audio à votre page d'accueil. Consultez la fiche N°3 « Éditer votre page d'accueil » pour obtenir des instructions.

Avant de télécharger de la musique vers le logiciel, vous devez copier les fichiers audio dans un dossier du dispositif, puis les ajouter à la bibliothèque musicale ou les copier dans l'un des dossiers déjà répertoriés.

- 1 Ouvrez le **Menu rapide**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres avancés**.
- 3 Sélectionner **Applications**.
- 4 Sélectionnez **Lecteur audio**.
- 5 Cochez la case indiquant Reconstituer la bibliothèque musicale maintenant afin que les fichiers soient ajoutés au lecteur audio.
- 6 Sélectionnez **OK**.
- 7 Quittez Paramètres avancés.



Sauvegarder/exporter les profils

Il est très important de sauvegarder tous les ensembles de pages personnalisés ainsi que les données de l'utilisateur en cas de problème sur votre dispositif. Ce menu est accessible par le biais de l'écran tactile ou de la souris uniquement.

- 1 Ouvrez le **Menu rapide**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres avancés**
- 3 Sélectionnez **Configuration utilisateur**.
- 4 Sélectionnez le bouton **Importer/Exporter** qui ouvre un assistant pour vous aider.
- 5 Sélectionnez **Exporter les paramètres et les données sélectionnés**.
- 6 Sélectionnez **Suivant**.
- 7 Sélectionnez **Exportation standard** (une exportation standard collectera tous les ensembles de pages de l'utilisateur, ainsi que ses paramètres, sons et expressions enregistrés, contacts, dictionnaires et paramètres grammaticaux).
- 8 Sélectionnez **Suivant**.
- 9 Nommez l'archive—Nous vous recommandons d'utiliser le nom d'utilisateur et la date.
- 10 Choisissez l'emplacement où la sauvegarde doit être enregistrée—Nous vous recommandons de l'enregistrer sur un périphérique USB.



Guide de mise en route

Pour obtenir des instructions détaillées et des informations supplémentaires sur Communicator 5, consultez le Guide de mise en route.





Votre compte myTobiiDynavox.com gratuit vous donne accès à de nombreux avantages, notamment un espace de stockage sur le cloud à des fins de sauvegarde, la synchronisation et le partage des ensembles de pages, des plans de cours et autres !

myTobiiDynavox.com



Rejoindre myTobiiDynavox vous permettra d'effectuer ce qui suit :

- Sauvegarder votre système en toute sécurité
- Télécharger gratuitement des outils et de la documentation
- Étudier des plans de cours Core First gratuits
- Connaître les mises à jour disponibles
- Accéder au service d'assistance technique et aux FAQ
- Partager des ensembles et des sous-ensembles de pages



Assistance supplémentaire

Communauté :

www.facebook.com/TobiiDynavoxFrance/

Assistance technique Amérique du nord :

**Europe: Pour toute demande d'assistance,
veuillez contacter votre revendeur.**

Amérique du Nord: 1-800-344-1778 ext. 1

#PowerToBeYou

#12008000 Tobii Dynavox Communicator Training Cards v:1.0 - fr-FR

