

Fiches de familiarisation

Moyen d'accès tactile à TD Talk



Table des matières

- 1** Configurer TD Talk
- 2** Présentation rapide de TD Talk
- 3** Utilisation de TD Talk : Le clavier
- 4** Utilisation de TD Talk : Messages rapides
- 5** Utilisation de TD Talk : Autres conseils en matière de communication
- 6** Pratiquer avec TD Talk
- 7** Accès tactile au dépannage
- 8** FAQ et ressources supplémentaires

Configurer TD Talk

- 1 Appuyez sur l'application **TD Talk**.



- 2 Faites défiler l'écran vers le haut à partir de la lettre T sur le clavier TD Talk afin d'ouvrir le menu hors écran.

- 3 Appuyez sur le bouton **Autres**.



- 4 Appuyez sur **Paramètres**.



- 5 Définissez la langue de l'interface TD Talk :

- Dans les paramètres généraux, appuyez sur **Ouvrir**.
- Sélectionner la langue de votre choix.
- Sélectionnez **Retour** pour revenir aux paramètres.



- 6 Sélectionnez vos voix :

- Dans le panneau Voix, appuyez sur **Ouvrir**.
- Dans la partie supérieure de l'écran, sélectionnez la langue à laquelle vous attribuerez une voix.
- Sélectionnez une voix.
- Sélectionnez **X** pour quitter les paramètres TD Talk.

Facultatif : Ajouter des langues de clavier supplémentaires.

- 1 Allez dans **Menu Hors Écran > Autres > Paramètres > Clavier > Ajouter/Modifier**.
- 2 Sélectionnez une langue dans l'onglet Installées ou accédez à l'onglet Télécharger pour rechercher d'autres langues.
- 3 Sélectionnez **Retour** pour revenir aux paramètres de TD Talk.
- 4 Ouvrez les **Paramètres de la voix**, sélectionnez la nouvelle langue, puis choisissez une voix pour cette même langue.



Remarque

Les voix situées en haut de la liste sont téléchargées et prêtes à être utilisées. Les voix situées en bas de la liste sont disponibles au téléchargement.




Conseils

Lorsque vous utilisez TD Talk, vous pouvez rapidement changer de langue en appuyant sur l'icône représentant un globe dans le coin inférieur gauche du clavier.

Présentation rapide de TD Talk

TD Talk est conçu pour une communication rapide et en face à face. Utilisez cette application lorsque vous interagissez avec d'autres personnes.

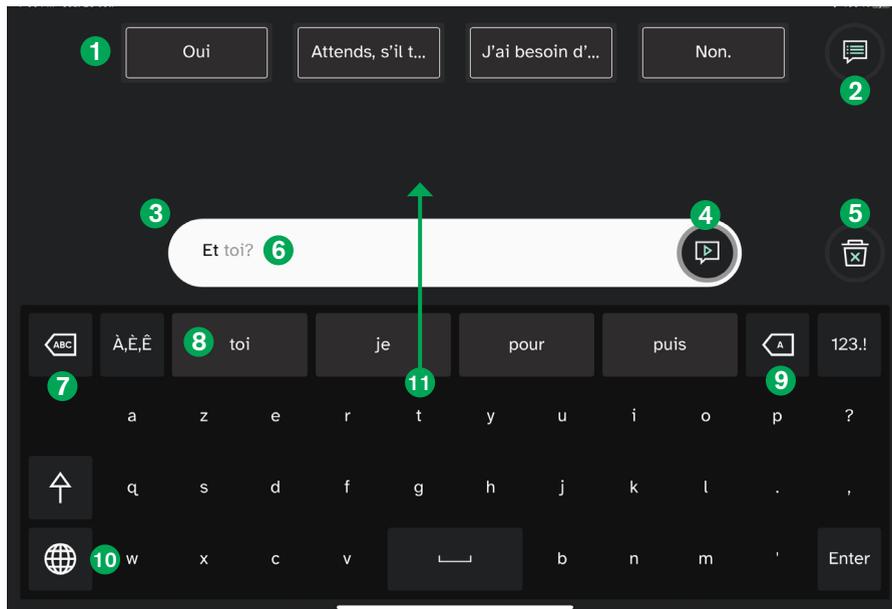

1 Messages rapides

Messages pré-écrits qui sont énoncés immédiatement lorsqu'ils sont sélectionnés.

2 Autres messages rapides

Ouvrez la page Messages rapides pour énoncer ou modifier vos messages rapides.

3 Fenêtre de message

Affichez et modifiez le texte que vous souhaitez énoncer ici.

4 Énoncer Énoncer le texte de la fenêtre de message. Vous pouvez également mettre en pause et reprendre l'énonciation.

5 Effacer Effacer tout le texte de la fenêtre de message.

6 Prédiction de phrases

TD Talk retient ce que vous saisissez et utilise ces informations afin de prédire des phrases. La prédiction est basée sur la fréquence et accélère la communication, tout en la rendant plus personnelle.

7 Supprimer un mot

Supprimer le mot qui se trouve à gauche du curseur.

8 Prédiction de mots

Prédit automatiquement des mots en fonction de ce que vous avez saisi jusqu'à présent.

9 Retour arrière

Supprimer le caractère qui se trouve à gauche du curseur.

10 Modifier la langue


Basculer entre les langues que vous parlez.

11 Menu Hors Écran

Faites défiler l'écran vers le haut à partir de la lettre T sur le clavier pour ouvrir le menu Hors Écran.

12 Autres

Accéder au tableau de bord et aux paramètres.

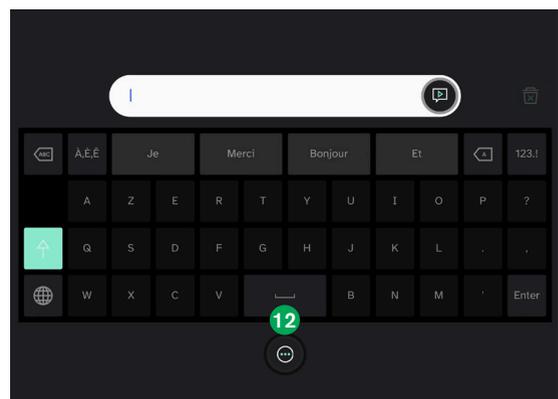

Utiliser TD Talk


Ces conseils peuvent vous aider à utiliser TD Talk de manière efficace.

Le clavier

Conseils


Saisir et supprimer

Utilisez les claviers et les boutons de suppression pour saisir et modifier des messages.

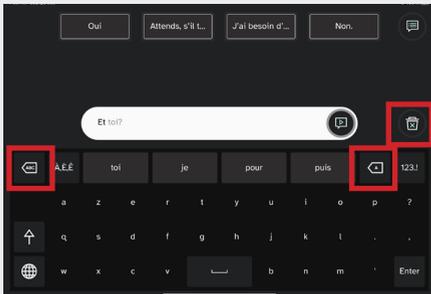


Profitez de la prédiction de mots.

La fonction de prédiction de mots retient ce que vous saisissez et peut accélérer votre communication.

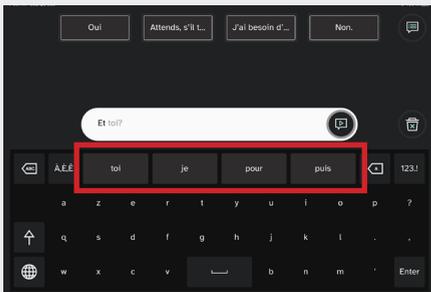

Utiliser la prédiction de phrases.

La prédiction de phrases retient la façon dont vous assemblez les mots et prédit ce que vous voulez dire en fonction de la fréquence d'utilisation. Plus vous parlez en utilisant TD Talk, plus la prédiction de la phrase s'améliore afin que vous puissiez dire ce que vous voulez plus rapidement tout en fournissant moins d'efforts.

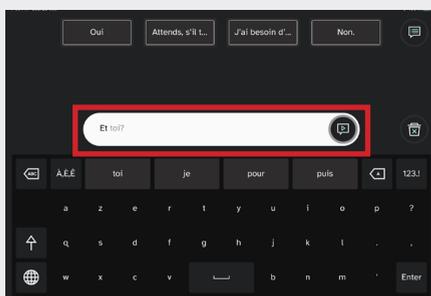

Essayez ce qui suit

- 1 Familiarisez-vous avec le clavier.
- 2 Retrouver ces boutons Effacer, Supprimer un mot et Retour arrière.
- 3 Ouvrir le clavier 123!, puis revenir au clavier ABC.

- 1 Lorsque vous commencez à taper un mot, jetez un œil aux boutons de prédiction de mots afin de voir si le mot que vous souhaitez utiliser s'y trouve.
- 2 Recommencez toutes les 2 à 3 lettres.
- 3 Si le mot que vous essayez de saisir apparaît sur l'un des boutons de prédiction de mots, appuyez sur le bouton pour ajouter le mot à la fenêtre de message.


- 1 Jetez un œil à la fenêtre de message après avoir saisi un ou deux mots afin de voir si TD Talk a prédit une phrase. Le texte prédit apparaît en gris à la suite du texte que vous avez saisi.
- 2 Si la phrase prédite correspond à celle que vous souhaitez utiliser, appuyez sur le dernier mot de celle-ci pour l'accepter.
- 3 Si la phrase prédite ne correspond pas à celle que vous souhaitez utiliser, continuez votre saisie.

Messages rapides

Conseils

Les messages rapides représentent souvent l'option de communication la plus rapide.

Utilisez les messages rapides pour attirer l'attention, faire savoir aux autres que votre saisie n'est pas terminée et préparer des interactions telles que des rendez-vous médicaux et des réunions de famille.

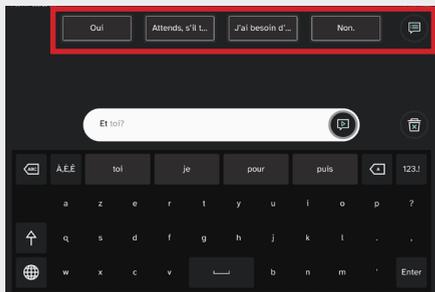


Essayez ce qui suit

- 1 Sélectionnez les quatre messages rapides en haut du clavier.
- 2 Sélectionnez **Autres messages rapides** et passez en revue les autres messages disponibles.

Utilisez la fonction Éditer les messages rapides pour personnaliser vos messages.

Personnalisez les messages rapides en fonction de vos besoins. Certains messages peuvent être permanents et d'autres temporaires.

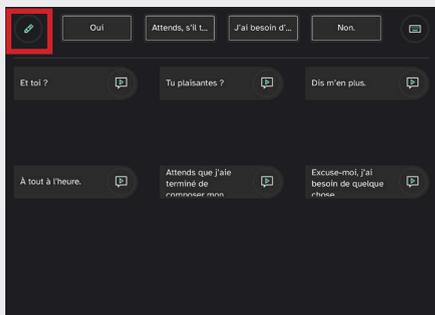

- 1 Sélectionnez **Autres messages rapides**, puis **Éditer les messages rapides**.
- 2 Sélectionnez le message rapide que vous souhaitez éditer, puis saisissez vos modifications avec le clavier.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer** et revenez à votre clavier principal.

Autres conseils en matière de communication

Conseils	Essayez ce qui suit
<p>Saisir les mots tels que vous les énoncez. La grammaire du langage parlé diffère de celle plus formelle du langage écrit. Utilisez des phrases partielles et une grammaire facile qui reflètent votre discours.</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ « Tu veux y aller ? »▪ « Je pourrais, tu sais, mais non merci ».▪ « La prochaine fois ».
<p>Utilisez la ponctuation et les lettres majuscules uniquement si elles améliorent le contenu de votre message. La saisie des points et des majuscules exige du temps et des efforts. Ils ne font aucune différence dans la façon dont votre message est énoncé, à moins que ces points ne soient utilisés pour séparer les phrases d'un paragraphe.</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Utilisez ? ou ! pour que votre message soit énoncé sous forme de question ou d'exclamation.▪ Les virgules insèrent des pauses dans une phrase. Utilisez des virgules pour accentuer et définir un rythme.▪ Les lettres majuscules ajoutent un impact visuel, mais ne changent pas la façon dont un mot est énoncé. TD Talk met automatiquement en majuscule la première lettre des phrases à votre place. Sinon, vous pouvez n'utiliser que des majuscules si vous le souhaitez.

Pratiquer avec TD Talk

Familiarisez-vous avec la conversation en utilisant TD Talk.

Saisissez quelques renseignements sur vous-même (par exemple, votre nom, votre adresse, etc.) puis prononcez-les. Entraînez-vous à utiliser les boutons Effacer, Supprimer le mot et Retour arrière.

Gagnez du temps grâce à la prédiction de mots.

Tapez « Je dois aller au café demain matin » sans utiliser la prédiction de mots. Ensuite, tapez à nouveau la phrase à l'aide de la prédiction de mots. Comparez le temps et les efforts requis.

Essayer d'utiliser la prédiction de phrases.

Saisissez l'une des phrases ci-dessous, puis utilisez le bouton Énoncer dans TD Talk pour prononcer la phrase cinq fois. La phrase sera alors ajoutée à votre ensemble de phrases. Effacez la fenêtre de message, puis recommencez à saisir la même phrase. La phrase prédite s'affiche alors. Appuyez sur le dernier mot de la phrase prédite pour la sélectionner, puis énoncez-la.

- Je m'appelle [votre nom].
- Mon adresse est [votre adresse].
- [Nom de la personne] est ma [relation].
- Je travaille (ou travaillais) à [employeur] en tant que [fonction]
- J'utilise cet appareil pour communiquer et je comprends tout ce que vous dites.

Pratiquer la saisie des mots tels que vous les énoncez.

Les phrases ci-dessous peuvent être utilisées dans une communication écrite formelle. Comment pourriez-vous les reformuler afin qu'elles puissent être utilisées dans une conversation décontractée ?

- Aujourd'hui, prenons un peu de temps pour parler des finances.
- Je vous souhaite beaucoup de succès.
- J'espère que vous êtes resté en bonne santé au cours de ces derniers mois.

Pensez aux phrases que vous utilisez souvent dans une conversation. Les exemples ci-dessous peuvent vous aider à en identifier quelques-unes. Saisissez-les dans TD Talk.

- **Exclamation**
Impossible ! C'est intéressant. C'est ça ?!
- **Mots ou phrases explétifs**
...comme..., euh..., je veux dire, vous savez, ...si cela veut dire quelque chose ...et tout ça.
- **Mots et phrases locaux**
Il fait super chaud. Vous venez tous ? Débarrasse la table.

Essayez de pratiquer la ponctuation et les majuscules.

Saisissez les phrases suivantes et écoutez la différence avec et sans ponctuation et lettres majuscules. Cette activité vous aidera à déterminer les situations où l'ajout de ponctuation et de majuscule est utile, ainsi que celles où vous pouvez l'ignorer pour gagner du temps.

	Option 1	Option 2
1	Je porterai une chemise, un jean et une veste.	Je porterai une chemise un jean et une veste
2	Puis-je l'avoir ?	Puis-je l'avoir ?
3	Il y a Jane là-bas.	Il y a Jane, là-bas.
4	Génial ! C'est incroyable !	Génial, c'est incroyable
5	J'aime ça mais pas lui	J'aime ça, mais pas lui.

Accès tactile au dépannage

Problèmes	Solutions
Sélection accidentelle de boutons.	<ul style="list-style-type: none">■ Confirmez que la personne est en mesure de voir clairement l'écran de l'appareil.■ Repositionnez l'appareil pour voir si l'accès est mieux pris en charge lorsque l'appareil est placé dans une autre position.■ Augmentez la durée pendant laquelle vous devez maintenir l'appui sur l'écran pour que votre appui soit pris en compte. Vous devez pour cela activer trois paramètres. <ol style="list-style-type: none">1 Activez Ajustements tactile <i>Paramètres iPadOS > Accessibilité > Tactile > Ajustements tactiles</i>2 Dans le même menu, activez Durée de maintien, puis ajustez la durée. <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #e6f2ff; padding: 5px;"><p> Remarque Le paramètre Durée de maintien est appliqué immédiatement. Vous devrez donc maintenir vos sélections tactiles pendant la durée définie.</p></div> <ol style="list-style-type: none">3 Dans le même menu, activez les Gestes de défilement, puis choisissez un paramètre de mouvement requis. « Standard » est le réglage le plus couramment utilisé.
La précision devient de moins en moins bonne avec le temps.	<ul style="list-style-type: none">■ Confirmez que la personne est en mesure de bien voir l'écran de l'appareil.■ Essayez de positionner l'appareil de façon à réduire au possible la nécessité de mouvements ou d'efforts de l'utilisateur lors des sélections.■ Essayez quelques-unes des solutions décrites dans la section « Sélection accidentelle de boutons ».■ Vérifiez si le paramètre Ajustement tactile améliore la précision à certains moments de la journée (voir les instructions ci-dessus).■ Consultez votre évaluateur ou consultant en solutions pour obtenir des options supplémentaires.
L'accès tactile à toutes les parties de l'écran est impossible.	<ul style="list-style-type: none">■ Confirmez que la personne est en mesure de bien voir l'écran de l'appareil.■ Repositionnez l'appareil pour voir si l'accès est mieux pris en charge lorsque l'appareil est placé dans une autre position.■ Consultez votre évaluateur ou consultant en solutions pour obtenir des options supplémentaires.
La saisie du mot de passe est difficile ou fastidieuse.	<ul style="list-style-type: none">■ Si votre iPad prend Face ID en charge, activez Face ID. <i>Paramètres de l'iPadOS > Face ID et Code d'accès > Paramètres Face ID</i>■ Si votre iPad ne prend pas Face ID en charge, désactivez le mot de passe. <i>Paramètres de l'iPadOS > Face ID et Code d'accès ou ID tactile et code d'accès > Code d'accès > Désactiver le code d'accès</i>

Si vous rencontrez des problèmes qui ne sont pas abordés dans le tableau ci-dessus ou si vos problèmes persistent, essayez d'effectuer les étapes suivantes.

- 1 Assurez-vous systématiquement qu'un support solide est en place.
 - Vérifiez que la personne est en mesure de bien voir l'écran de l'appareil. Assurez-vous qu'aucune lumière éblouissante ne se reflète sur l'écran et, si la personne a besoin de lunettes, assurez-vous qu'elle les porte.
 - Positionnez l'appareil de manière à ce que la personne puisse toucher l'écran facilement et avec précision sans avoir à fournir d'efforts importants. L'appareil devra certainement être repositionné plusieurs fois tout au long de la journée.
- 2 Consultez votre évaluateur ou consultant en solutions pour identifier d'autres solutions potentielles.

**La durée de maintien s'applique-t-elle partout ?**

Oui La durée de maintien s'applique à l'ensemble de votre appareil. Vous pouvez l'activer et le désactiver à volonté dans les paramètres iPadOS.

Que se passe-t-il si l'accès tactile devient difficile ?

Contactez votre évaluateur ou consultant en solutions pour obtenir de l'aide afin d'identifier des solutions potentielles.

Comment fonctionne la prédiction des phrases dans TD Talk ?

La prédiction des phrases dans TD Talk est basée sur la fréquence. Les phrases que vous avez énoncées plusieurs fois auparavant sont prédites lorsque vous commencez à taper le début de la phrase. Cette fonction a tendance à prédire des phrases partielles (p. ex. : je vais, qu'est-ce que vous) plutôt que des phrases complètes (p. ex. : je vais au magasin. Qu'est-ce que vous aimez ajouter votre café ?) parce qu'elles sont utilisées dans une plus grande variété de situations et vous évitent d'avoir à les éditer trop souvent.

Ressources supplémentaires

Scannez les codes QR ou utilisez les liens.



Page d'assistance de TD Talk
grco.de/TDTalkHelpFR



Apple
apple.com/fr/accessibility



myTobiiDynavox
mytobiidynavox.com



Centre d'apprentissage Tobii Dynavox
(en anglais uniquement)
learn.tobiidynavox.com



Communauté TD
grco.de/TDFB



Assistance technique Amérique
du Nord
1-800-344-1778 Poste 1